

Noritake
Super Porcelain EX-3



1. Metal - dopasowanie



2. Odgazowanie



3. Nabranie opakera w paście



4. Opaker 1-sza warstwa (wash)



5. Opaker 1-sza warstwa (pokrycie)




6. Sprawdzenie wnętrza



7. Opaker 2-ga warstwa



8. Opaker - modyfikacja

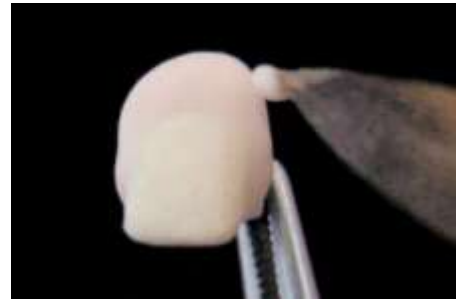

9. Porc. przyszyjkowa (CV)



10. Opakdentyna nakładanie OB (0.3mm)



11. Uformowanie



12. Strona językowa



13. Nałożenie dentyny



14. Uformowanie dentyny



15. Ścięcie - zaznaczenie linii



16. Ścięcie (1/3 od brzegu)



17. Ścięcie (środek)



18. Ścięcie (na styčných)



19. Mamelony - nacięcie



20. Mamelony - uformowanie



21. Sprawdzenie grubości dentyny (>0.8)



22. Nałożenie szkliwa (enamel)



23. Bez szkliwa po str. językowej



24. Nałożenie na styčných



25. Wygładzenie



26. Sprawdzenie środka



27. I-sze palenie/ lekki połysk

Luster Porcelain



28. T-Blue (krawędź) LT0 (mamelon)



29. Creamy Enamel



30. LT1



31. CCV-1 / CCV-2




32. Widok końcowy



36. Dopasowanie (DP-05)



37. Nacięcie rowków

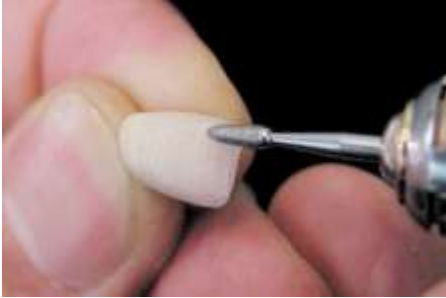

38. Drobne linie/detale (DP-02)



39. Sprawdzenie (Detail Checker)



40. Wygładzenie




41. Polerowanie (pearl surface C)



42. Polerowanie (pearl F)



43. Korekta

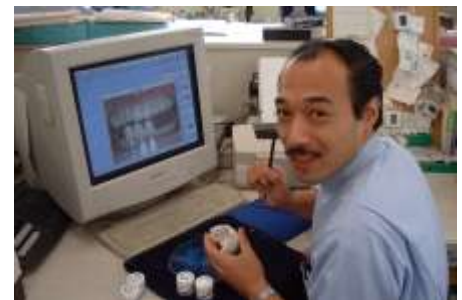

Kazunobu Yamada

July 2004 / Instructed by Kazunobu Yamada